

## Gebruik en onderhoudstips voor uw steunzolen

### GEBRUIK

- Steunzolen zijn een hulpmiddel die uw gang beïnvloeden.
- Uw voeten zullen de eerste weken moeten wennen aan het gecorrigeerd looppatroon.
- Merkt u roodheid of blaren, gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen om uw zolen aan te passen.
- Een degelijke en passende schoen is minstens even belangrijk als een goede steunzool, daarom raden wij u aan om een voldoende ruime schoen te kopen met, indien mogelijk, een uitneembaar voetbed.
- **Opgelet:** Uw privé steunzool mag niet in uw veiligheidsschoenen gelegd worden.
- Uw steunzool bestemd voor in uw werkschoenen mag enkel in het overeenkomstig model/merk gelegd worden.

### ONDERHOUD

- Haal uw steunzolen regelmatig uit uw schoenen om te verluchten.
- Reinigen kan met lauw water en een neutrale zeep. Spoel de zeepresten altijd weg.
- De steunzolen mogen enkel aan de lucht gedroogd worden.
- Indien de bekleding versleten is kan deze door ons vernieuwd worden.

### HERNIEUWING OF 2<sup>DE</sup> PAAR?

- Het is steeds aangewezen om een afspraak te maken met uw specialist voor een controle van de voetproblemen en een evaluatie van de steunzolen.
- Kinderen <18 jaar kunnen jaarlijks een tegemoetkoming verkrijgen. Bij volwassenen is er 2-jaarlijks een tegemoetkoming mogelijk, mits voorschrift.
- Indien u een 2<sup>de</sup> paar wenst kunt u ons telefonisch contacteren. Wij slaan uw gegevens op, op deze manier kunnen we exact dezelfde steunzolen voor u vervaardigen.

### ONZE LOCATIES

 NAZARETH

Steenweg Deinze 72

 EEKLO

Molenstraat 44

 OUDENAARDE

Stationsstraat 7

Telkens op afspraak

Tel: **09/311.80.04**