

Conseils d'utilisation et d'entretien pour vos semelles orthopédiques

UTILISATION

- Les semelles orthopédiques sont une aide qui influence votre démarche.
- Vos pieds devront s'habituer, durant les premières semaines, au schéma de marche corrigé.
- Si vous remarquez des rougeurs ou des ampoules, veuillez nous contacter immédiatement afin d'adapter vos semelles.
- Une chaussure solide et adaptée est tout aussi importante qu'une bonne semelle orthopédique. C'est pourquoi nous vous conseillons d'acheter une chaussure suffisamment spacieuse, avec si possible une semelle intérieure amovible.
- Attention: votre semelle privée ne peut pas être placée dans vos chaussures de sécurité.
- La semelle destinée à vos chaussures de travail ne peut être utilisée que dans le modèle/marque correspondant.

ENTRETIEN

- Retirez régulièrement vos semelles de vos chaussures pour les aérer.
- Le nettoyage peut se faire avec de l'eau tiède et un savon neutre. Rincez toujours bien les résidus de savon.
- Les semelles doivent être séchées uniquement à l'air libre.
- Si le revêtement est usé, nous pouvons le renouveler.

RENOUVELLEMENT OU DEUXIÈME PAIRE ?

- Il est toujours conseillé de prendre rendez-vous avec votre spécialiste pour un contrôle des problèmes plantaires et une évaluation des semelles.
- Les enfants de moins de 18 ans peuvent bénéficier d'une intervention annuelle. Pour les adultes, une intervention est possible tous les deux ans, sur prescription médicale.
- Si vous souhaitez une deuxième paire, vous pouvez nous contacter par téléphone. Nous conservons vos données, ce qui nous permet de fabriquer exactement les mêmes semelles pour vous.